


Antigenski testi v samoizvedbi za dijake in dijakinje

V nosnici zavrtite samo do globine 2 centimetrov!
Kratko in neboleče! Rezultat je na voljo čez 15 minut!

Kaj potrebujete za to?



Kartico testiranja

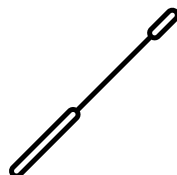


Palčico z vato



Raztopino




Kako ravnati?

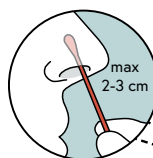


Korak 1:

- Vato podržite SAMO 2 centimetra v nosnico.
- Palčico z vato je treba petkrat zavrteti.
- Menjajte nosnico, ponovno zavrtite.

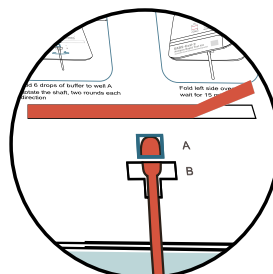


Korak 2:

- Odstranite zaščito lepilnega traku in porinite vzorec v odprtino

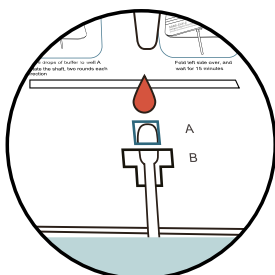

Korak 3:

- Dajte 6 kapljic raztopine v poglobitev in vato zavrtite dvakrat v vsaki smeri

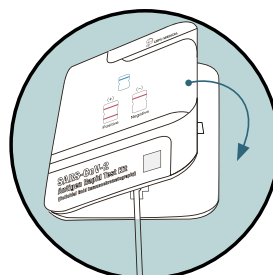

Korak 4:

- Zlepite levo in desno stran.
- Rezultat testa se prikaže čez 15 minut.



Korak 5:

- Pozitiven rezultat testa:
 - če ste doma: kličite tel. št. 1450
 - če ste v šoli: vodstvo šole bo poklicalo 1450 ali krajevni zdravstveni urad;
- Negativen rezultat testa: Obiskujte šolo še naprej in ostanite zdravi!